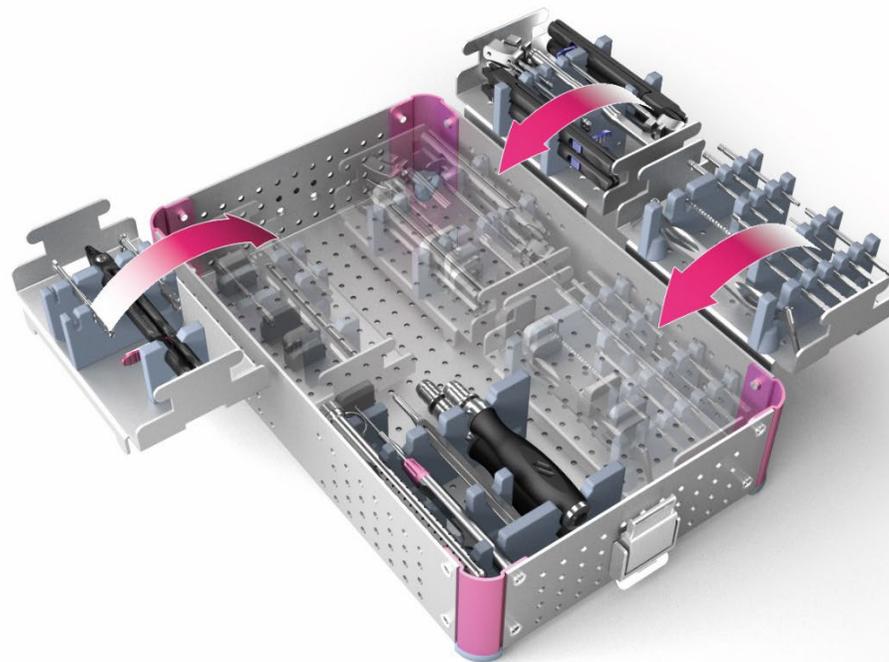




Instrucciones para la Inspección de los Productos Sanitarios Reutilizables



1. INTRODUCCIÓN

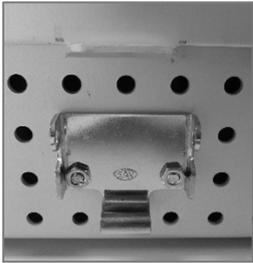
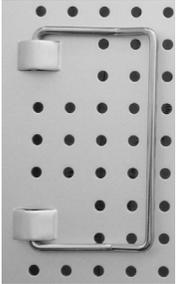
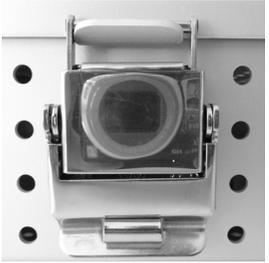
El propósito de este documento es describir las inspecciones que el usuario debe efectuar para garantizar el correcto funcionamiento de los productos sanitarios reutilizables de NOVASTEP. Consulte la etiqueta y el folleto del embalaje para determinar si el instrumento es reutilizable.

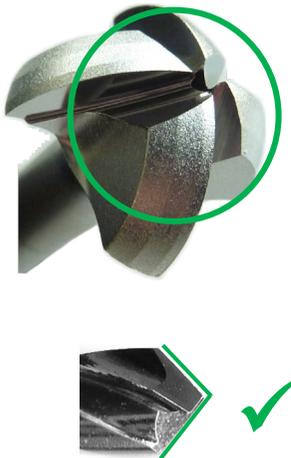
Por lo general, un mal funcionamiento puede estar asociado a un mantenimiento deficiente o a un uso inadecuado del producto, y puede prolongarse hasta el final de su vida útil.

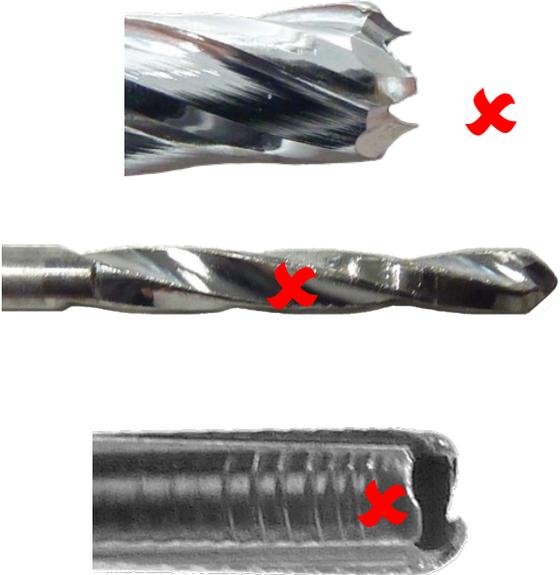
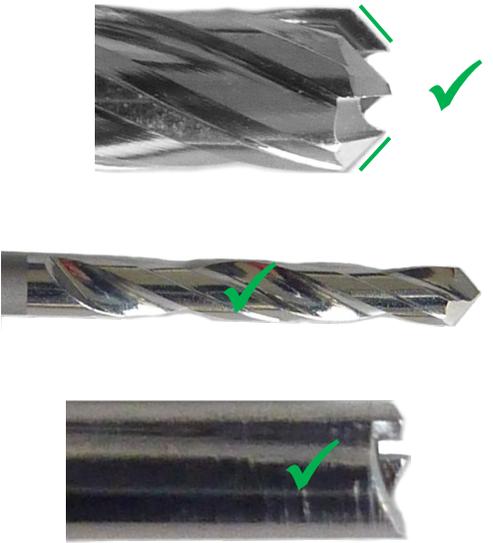
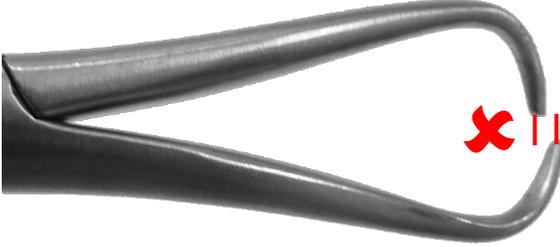
Dado que una gran cantidad de factores que dependen del usuario pueden provocar un mal funcionamiento de los productos, NOVASTEP no recomienda un número máximo de usos. Una estricta comprobación, con pruebas de funcionamiento cuando proceda, permitirá comprobar el rendimiento del producto reutilizable y su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.

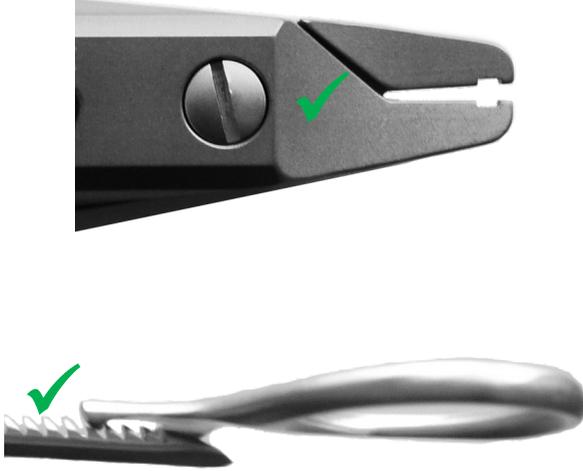
2. INSPECCIÓN

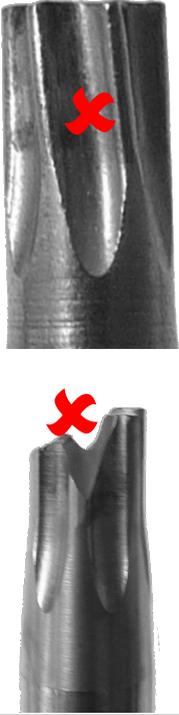
Tome precauciones cuando manipule instrumentos romos y afilados. Si es necesario, desmonte el producto y móntelo conforme a la información proporcionada en la técnica quirúrgica.

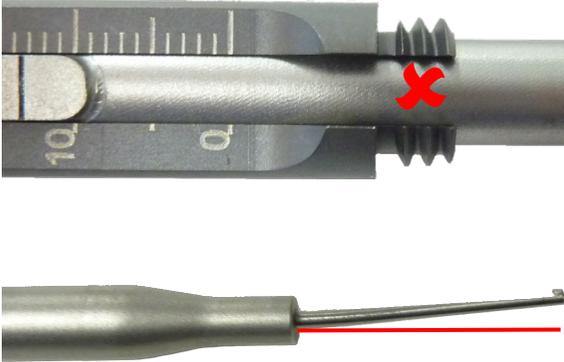
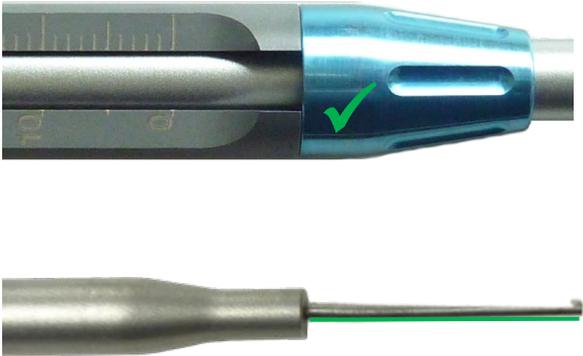
Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
Estado de las cajas de esterilización	Aspecto de las cajas y las marcas Funcionamiento de los cierres y las asas	<div style="text-align: center;">  <p>Asas desmontadas</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cierre roto</p> </div>	<div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;">  </div>
Estado de los identificadores y las marcas	Legibilidad de las marcas Sin corrosión	<div style="text-align: center;">  </div>	<div style="text-align: center;">  </div>

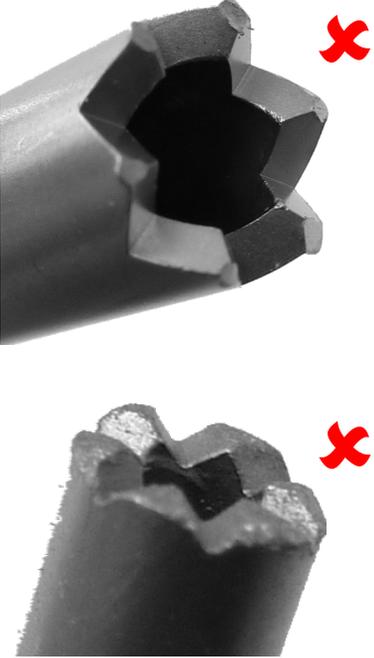
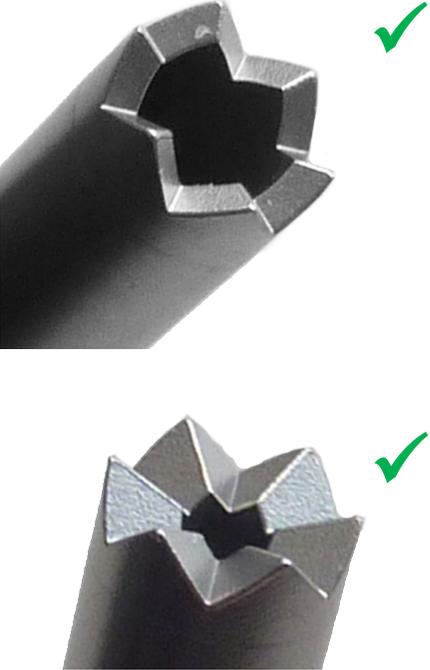
Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
			
<p>Estado de las herramientas cortantes (fresa, avellanador, etc.)</p>	<p>Los dientes y/o las puntas no están dobladas ni deformadas</p> <p>La punta no está roma</p> <p>La parte cilíndrica no está deformada (concentricidad)</p>		

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
			
Estado de las pinzas	<p>Cierre y apertura de las pinzas Funcionamiento de los resortes Aspecto de las zonas activas de las pinzas (no hay rebabas, deterioro ni deformación) Los tornillos están presentes y conservan su capacidad de sujeción Funcionamiento de los dientes</p>		

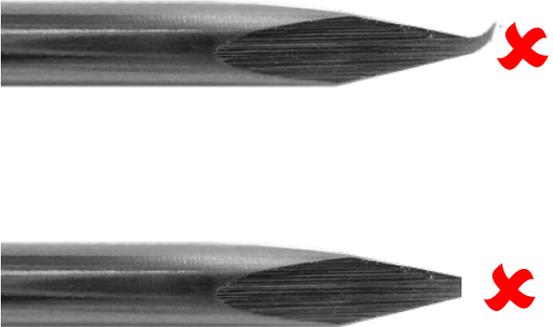
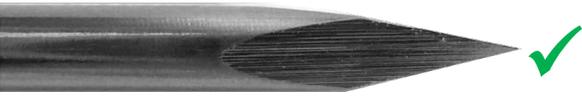
Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
			
Estado de los destornilladores	Los destornilladores no están doblados, deformados ni rotos		

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
			
Estado del calibrador	Capacidad de sujeción de la corredera Los tornillos están presentes Lectura del calibrador Enroscado del vástago del calibrador		

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
	<p>Capacidad de sujeción del soporte del calibrador al cuerpo</p>		
<p>Estado de los instrumentos canulados o perforados</p>	<p>Usar el pin adecuado para comprobar que la cánula no está bloqueada</p> <p>Comprobar que los dientes no están doblados ni dañados</p>		

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
			

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
Estado de los instrumentos con rosca	Comprobar el estado y el funcionamiento de la rosca		

Criterios	Instrucciones para la inspección visual y funcional de todo el producto.	Ejemplo de defecto que requiere la sustitución del producto	Ejemplo de producto no defectuoso
Estado de los pins	<p>La punta no está doblada</p> <p>En la parte cilíndrica no hay deformaciones, torsiones ni deterioro (oscurecimiento, muescas, rugosidad elevada, etc.)</p>		
Estado de los mangos y de las conexiones AO	Funcionamiento del mecanismo de clic y bloqueo mediante un conector		

